

AAK gg. promyelozytäre leukämische Proteine i.S.

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung 22.02.2023 (Röber)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen: -Serum-Monovette -Lagerung bei Raumtemperatur bis 8h, bis 2 Tage bei 2-8 °C, darüber hinaus Probe bei -20 °C einfrieren. Eingefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Testen gut durchgemischt werden.</p> <p>Einflussgrößen: Keine gesonderten Hinweise.</p> <p>Störgrößen: Hämolytische, lipämische und ikterische Proben ergaben bis zu einer Konzentration von 5 mg/ml für Hämoglobin, von 20 mg/ml für Triglyceride und von 0,4 mg/ml für Bilirubin keine Interferenzen im EUROLINE-Blot.</p>
Material	Serum Immunologie
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 2 negativ
Verfahren	BLOT
letzte Änderung	02.01.2025 00:05