

Proteinase 3-Ak (PR3: cANCA-Spezifität) i.S. im Serum Immunologie (CU)

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung 15.09.2022 (Röber)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen: -Serum-Monovette -Lagerung bei Raumtemperatur bis 8h, bis 2 Tage bei 2-8 °C, darüber hinaus Probe bei -20 °C einfrieren. Eingefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Testen gut durchgemischt werden.</p> <p>Einflussgrößen: Keine gesonderten Hinweise.</p> <p>Störgrößen: Stark hämolytisches, lipämisches oder ikterisches Serum ist nicht geeignet. Wärmebehandelte Proben bzw. Proben mit mikrobieller Kontamination oder sichtbaren Partikeln dürfen nicht verwendet werden. Angabe des Herstellers: Proben mit Bilirubin bis zu 10 mg/dl, Hämoglobin bis zu 200 mg/dl, Triglyceriden bis zu 1000 mg/dl, Cholesterin bis zu 224 mg/dl bzw. IgM-Rheumafaktor bis zu 500 IE/ml zeigten keine Interferenz bei diesem Test.</p>
Einheit	CU
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig
Material	Serum Immunologie
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 19.9 <10.0
Verfahren	CIA
letzte Änderung	02.01.2025 00:32