

## okkultes Blut i. St., immunol. - kurativ

<b>Abnahmevorschrift</b>	<p>Letzte Änderung: 16.09.2018 (ko)/25.01.2022 (Ko)  eingestellte Methode  Synonym: iFOB</p> <p>Ausschließlich für kurative Zwecke (keine präventive Untersuchung)!</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen:  - die Probennahme des Stuhls erfolgt nach der zum Proberöhrchen mitgelieferten Anleitung!  - ausschließlich immoCARE-C Probefläschchen (SAP-Nr.: 208602) verwenden!  - die Probe sollte für eine zeitnahe Testauswertung umgehend an das Labor geschickt werden.  - die Probe ist bei -20°C bis +30°C 7 Tage haltbar</p> <p>Störfaktoren:  - den Test nicht durchführen, während der Regelblutung und 3 Tage danach, bei Durchfall oder bei akut blutenden Hämorrhoiden  - eine Reihe von Arzneimitteln wie z.B. Acetylsalicylsäure, Glukokortikoide, nichtsteroidale Antiphlogistika/Antirheumatika oder Cumarin-Derivate können zu gastrointestinalen Blutungen führen, deshalb sollten diese Medikamente möglichst zuvor mehrere Tage abgesetzt werden  - eine Diät muss nicht eingehalten werden</p>
<b>Einheit</b>	ng/mL
<b>Material</b>	Stuhl
<b>Probengefäß</b>	immo CARE-C Probenfläschchen(SAP 208602)
<b>Referenzbereich</b>	< 50 Cutoff
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:37