

Kalzium i.U. (Konz.)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 24.04.2017 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Sammelurin (Angabe von Sammelmenge und -zeit), im Spontanurin - Die Kalziumbestimmung im Urin kann vom Kontrastmitteln "Omniscan" (Einsatz bei Kernspintomographie) gestört werden ("Omniscan" (Wirkstoff Gadodiamid) verursacht signifikant niedrigere Kalzium-Analysenwerte.) - Urin nicht im Kühlschrank aufbewahren (wird nicht nach Beendigung der Urinsammlung am gleichen Tag analysiert muss Urin mit HCl angesäuert werden (pH <2) Hinweis: Methodenumstellung im IKL am 24.04.17 vom System DxC800 auf Cobas8000 (entsprechend Validation: keine signifikanten Unterschiede, keine Änderungen Ref.-bereich und medizinische Bewertung) |
| Einheit | mmol/L |
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig |
| Material | Sammelurin |
| Probengefäß | Urin-Monovette |
| Probenvolumen | 10 ml |
| Qualitätsmanagement-Status | akkreditiert |
| Referenzbereich | n.def. |
| Verfahren | Photometrische Messung |
| letzte Änderung | 02.01.2025 00:29 |