

Multiplate-Analyse

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 05.08.2015 (Sie)</p> <p>Präanalytik:</p> <ul style="list-style-type: none">- 24 h vor der Blutabnahme sportliche Betätigung meiden,- auf Alkohol und stark fetthaltige Mahlzeiten verzichten,- Blutabnahme unter stressfreien Bedingungen am liegenden Patienten,- Staudruck zur Venenpunktion zwischen dem systolischen und diastolischen Druck,- Stauung nicht länger als 1 Minute, während der Entnahme Stauschlauch öffnen,- großlumige (19 - 21 G) Kanüle,- nicht das erste Blut nach der Venenpunktion,- Hirudin-Monevette muß bis zur Markierung gefüllt werden,- Vermischung durch mehrmaliges Schwenken (nicht Schütteln) unmittelbar nach Abnahme,- keine Blutentnahme aus Kathetern, <p>- Transport muss ungekühlt innerhalb von 1 Stunde nach der Blutabnahme erfolgen, - Messung frühestens 30 Minuten und spätestens 3 Stunden nach Blutabnahme.</p>
Häufigkeit	täglich, normalschichtig
Material	Hirudin-Blut
Probengefäß	HIRUDIN-Monovette
Probenvolumen	1.5 ml
letzte Änderung	02.01.2025 00:31