

Blut i.Stuhl (okkult),Test 1*

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 01.04.2017 (Ko)</p> <p>Achtung, der chemische Okkultbluttest mit Guajak darf ab 1.April 2017 nicht mehr für die Darmkrebsfrüherkennung eingesetzt werden (Krebsfrüherkennungs-Richtlinie / KFE-RL, veröffentlicht im Bundesanzeiger AT 08.07.2016 B2, in Kraft getreten am 1.Januar 2017). Für den kurativen Bereich gilt eine Übergangsfrist bis zum 1. Oktober 2017.</p> <p>Abnahme- und Transportbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Probenstabilität im Stuhl-Testbriefchen: max. 12 Tage bei 4-28°C, geschützt vor direktem Sonnenlicht oder UV-Strahlen. - Stuhl nach Vorschrift in die Testbriefe auftragen. Es sollen Proben von drei aufeinanderfolgenden Stuhlgängen bzw. vom Stuhlgang von drei aufeinanderfolgenden Tagen entnommen werden (= pro Stuhlgang einen Testbrief verwenden). - Diätvorschriften und Hinweise zur Durchführung auf der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. - Die Testbriefe sind ausschließlich für Stuhl einzusetzen. Für andere Körpermaterialien ist der Test nicht zugelassen! Das gilt insbesondere für Mageninhalt, da der saure pH-Wert nach Angaben des Herstellers das Analysenergebnis stört.
Häufigkeit	wöchentlich
Material	Stuhl-Brief1
Probengefäß	Stuhl-Brief 1
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert
Referenzbereich	negativ
Verfahren	Testbrief
letzte Änderung	24.05.2023 00:03