

C1-Esterase-Inhib. i.P.

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 01.07.2015 (Ko)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 h vor der Blutabnahme sportliche Betätigung meiden, - auf Alkohol und stark fetthaltige Mahlzeiten verzichten, - Blutabnahme unter stressfreien Bedingungen am liegenden Patienten, - Staudruck zur Venenpunktion zwischen dem systolischen und diastolischen Druck, - Stauung nicht länger als 1 Minute, während der Entnahme Stauschlauch öffnen, - großlumige (19 - 21 G) Kanüle, - nicht das erste Blut nach der Venenpunktion, - Mischungsverhältnis 1 Volumenteil Citrat und 9 Volumenteile Venenblut genau einhalten, - Vermischung des Citrates mit dem Blut durch mehrmaliges Schwenken (nicht Schütteln), - keine Blutentnahme aus Kathetern. 						
Einheit	g/L						
Häufigkeit	wöchentlich						
Material	Citrat-Blut						
Probengefäß	Citrat-Monovette						
Probenvolumen	1.5 ml						
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert						
Referenzbereich	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Alter</th> <th style="text-align: left;">Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 6M</td> <td>n.def.</td> </tr> <tr> <td>> 6M</td> <td>0,18 - 0,32</td> </tr> </tbody> </table>	Alter	Referenzbereich	≤ 6M	n.def.	> 6M	0,18 - 0,32
Alter	Referenzbereich						
≤ 6M	n.def.						
> 6M	0,18 - 0,32						
Verfahren	Nephelometrie						
letzte Änderung	02.01.2025 00:15						