

## Zellzahl (kernhaltige Zellen) im Synovial-Punktat (Gelenkpunkt.) (Zellen/ $\mu$ L)

<b>Abnahmevorschrift</b>	Letzte Änderung 06.09.2019 (IC)  Transport- und Abnahmebedingungen: 0.5 ml Material umgehend ins Labor, genaue klinische Angaben unbedingt erforderlich Störungen: Rasche Degeneration der Zellen durch Probenlagerung: Die Leukozytenzahl sollte innerhalb von 24 St. bestimmt werden; geronnene Proben werden mit 10 $\mu$ l Hyaluronidase versetzt. Bei rheumatischer Arthropathie, Luxationen, periprothetischer Fraktur, Vorliegen einer Fistel und 6 Wochen postoperativ ist die Leukozytenzahl im Gelenkpunktat nicht verwertbar.
<b>Einheit</b>	Zellen/ $\mu$ L
<b>Häufigkeit</b>	werktags, normalschichtig
<b>Material</b>	Synovial-Punktat (Gelenkpunkt.)
<b>Probengefäß</b>	EDTA-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	2.7 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Verfahren</b>	Elektronische Zählg. bzw. ggf. manuelle Zählg.
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:36