

max.Aggr.Ristocetin induz.(0,5 mg/ml)

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 02.09.2015 (Sie)</p> <p>Telefonische Anmeldung unter 458 2570 erforderlich, Angabe der Indikation und Medikation notwendig, Monovetten nicht kühlen! Analytik ist nur werktags von 7 bis 13 Uhr möglich.</p> <p>Präanalytik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 h vor der Blutabnahme sportliche Betätigung meiden, - auf Alkohol und stark fetthaltige Mahlzeiten verzichten, - Blutabnahme unter stressfreien Bedingungen am liegenden Patienten, - Staudruck zur Venenpunktion zwischen dem systolischen und diastolischen Druck, - Stauung nicht länger als 1 Minute, während der Entnahme Stauschlauch öffnen, - großlumige (19 - 21 G) Kanüle, - nicht das erste Blut nach der Venenpunktion, - Hirudin-Monevette muß bis zur Markierung gefüllt werden, - Vermischung durch mehrmaliges Schwenken (nicht Schütteln) unmittelbar nach Abnahme, - keine Blutentnahme aus Kathetern, <p>Stör- und Einflussgrößen Thrombozytenaggregation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine Analytik in Proben mit Gerinnselbildung sowie bei Füllungsabweichung >10% - Keine Analytik bei ausgeprägter Hämolyse, ausgeprägtem Ikterus sowie starker Lipämie - Keine Analytik in Proben mit Thrombozytenzahlen <100 GPT/l
Einheit	%
Häufigkeit	werktags - Anmeldung im Labor erforderlich
Material	Citrat-Blut
Probengefäß	Citrat-Monovette
Probenvolumen	1.5 ml
Referenzbereich	≤ 10
Verfahren	Aggregationstest
letzte Änderung	16.11.2023 00:03