

Faktor VIII-Inhib.-Verdünnungsanalyse

Abnahmevorschrift	letzte Änderung: 09.02.2015 (Sie) siehe Faktor VIII
Klinische Hinweise	Indikation: Wiederholung der Faktor VIII-Analytik in höherer Probenverdünnung bei unbekannter Faktor VIII-Verminderung <40%. Interpretation: Steigt die Aktivität unter Berücksichtigung des Verdünnungsfaktors nicht an, handelt es sich um eine echte Verminderung (Inhibitor negativ). Bei Vorliegen eines Inhibitors wird dieser verdünnt und die Faktoraktivität steigt an (Inhibitor positiv). Die Höhe des Inhibitor-Titers muss dann mit der Bethesda-Methode ermittelt werden.
Material	Citrat-Blut
Probengefäß	Citrat-Monovette
Probenvolumen	1.5 ml
letzte Änderung	18.03.2026 15:33