

Endomysium-Ak (IgA) i.S.

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung 25.10.2022 (Röber)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen: -Serum-Monovette -Probenlagerung bei 2-8 °C bis zu 14 Tage, längere Lagerung eingefroren bei -20°C.</p> <p>Einflussgrößen: - Bei Vd.a. Zöliakie sollte vor der serologischen Diagnostik eine Glutenzufuhr über die Ernährung bestehen (tägl. ca. 10g Gluten für mind. 3 Monate). Wurde bereits eine glutenfreie Kost begonnen, beeinträchtigt dies die Testzuverlässigkeit. - Da der Test Immunglobuline der Klasse IgA erfasst, sollte sichergestellt sein, dass kein IgA-Mangel besteht. - Hypoproteinämie stellt einen Risikofaktor für falsch negative Resultate dar.</p> <p>Störgrößen: Herstellerangabe: Hämolytische, lipämische und ikterische Proben zeigten keinen Einfluss auf das Analysenergebnis.</p>
Einheit	Titer
Material	Serum Immunologie
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	<p>extrem erhöht: 639</p> <p>Kommentar: Referenzbereich: keine Reaktion bei Titer 1:10</p>
Verfahren	IFT
letzte Änderung	02.01.2025 00:23