

Kryoglobuline: Visuelle Beurt. Serum *

Abnahmevorschrift	Letzte Änderung: 19.06.2024, IE Präanalytik: <ul style="list-style-type: none">- Analytik nur UKD-intern- Anmeldung im Labor erforderlich (-3411)!- Nüchternblutabnahme- Heparin stört, falsch positive Ergebnisse- für das gewärmte Serum bitte Serum-Monovette ohne Zusätze (SAP-Nr.: 200074) verwenden- Material für Blutentnahme (Nadeln/Monovetten) vor Blutabnahme auf 37°C vorwärmen- nach Blutabnahme Material sofort ins Haus 53 - Zentrale Annahme bringen- der Transport muss bei 37°C erfolgen, ansonsten kann es zu falsch negativen Ergebnissen kommen. Verwenden Sie am besten auf 37°C vorgewärmte Gelpacks - Wir bitten, das Material unbedingt beim Laborpersonal persönlich abzugeben.
Häufigkeit	werktags - Anmeldung im Labor erforderlich
Material	Serum 37 Grad Celsius
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert
Verfahren	Kühlschranktest
letzte Änderung	02.01.2025 00:29